

Falcon的日常清洁维护

- 请不要将Falcon浸入水中。
- 请使用附带的镜布保持前视镜清洁无指纹。可使用合适的镜片清洁剂湿润前视镜及镜片，之后使用镜布擦干。
- 请不要将粗糙的清洁物品用于Falcon的任何部位。
- 非专业人士请勿在旋松螺丝前，试图将视镜从镜架上移下。
- 由于其参数角度均为其预设目标用户量身调整，请不要与其他人共用同一台Falcon。
- 请不要将Falcon留置在车内或其他高温地点。
- 除非经过专业训练并获得执照，否则请勿在驾驶时佩戴Falcon。

保修：VES[®] Falcon部件及装配瑕疵保修12个月。

VES[®] Falcon随机附带的电池及连接线保修90天。

VES[®] Falcon仅可使用Ocutech电池。如因使用其他电池造成设备损坏，本公司不对此负责。



山东省青岛市市南区香港中路8号中铁青岛中心A座1403



联系电话：18661990716

用户操作指南

OCUTECH[®] VES[®] FALCON 自动聚焦助视器

Falcon部件



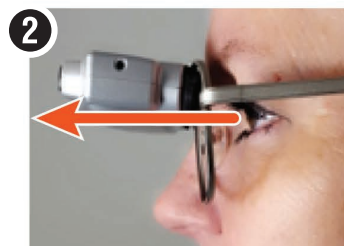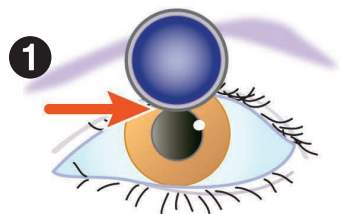

1. 将目镜置于瞳孔上方。镜架的鼻托应与目镜的底部持平。

2. 将镜筒装载在镜架上，从Falcon的下方看，助视器应有一定的上扬角度（如图上红色箭头角度所示）。

3. 请患者稍稍向下低头，目光透过目镜。调整视角，直至镜筒与患者视线成一条直线（如图上红色箭头所示）。

4. 不要拔下镜筒处的USB线。

5. 使用USB线连接电池。当USB线插好时，电池将自动开始工作。Falcon将自动进行简单的自我检测（每次开机时该自检都将自动进行）。按下电源指示按钮（如图上红色箭头所示），保证电池向Falcon正常供电。亮起灯的数量表示剩余电量百分比。

6. 充电。使用附带的micro-USB给电池充电，充满后Falcon可续航8小时。若想关闭Falcon仅需拔下电源线。

7. 当您拿到Falcon设备时，我们会为您量身设定最佳聚焦位置，后期如不合适则需要重新对目镜进行矫正。

8. 使用顶部聚焦按钮

自动聚焦有时可能无法达到用户预期，这可能是由于看向非正常反光物体或透过玻璃看向窗外。轻按顶部聚焦按钮（如红色箭头所示），聚焦将停留在当前所处位置。再按一次，自动聚焦重新开启。长按数秒，Falcon的聚焦将改变为保持在无限远。再按一次，自动聚焦功能开启。

快按：聚焦将停留在当前位置

长按：聚焦变为无限远

重启自动聚焦：再按一次将重启自动聚焦

9. 佩戴头带应以舒适为前提，不应过紧。过紧时将影响佩戴舒适性。

